

# individuelle Einstärkenlinsen


## als Jahres- und 6M Halbjahreslinsen

Schier **unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten** zeichnen TECHLENS Individuallinsen aus. Sie sind als Jahres- oder Halbjahreslinsen erhältlich. Neben der Auswahl der Basiskurve kann zusätzlich die periphere Randabflachung bestimmt werden. Standard ist die Abflachung N (normal), sie kann aber auch in S (steil), F (flach) oder O (einkurvige Rückfläche) gewählt werden, um den Corneo-Skleral-Bedingungen noch besser zu entsprechen.

Neben der individuellen Parameterwahl, steht auch die Einzigartigkeit für Ihren Kunden im Vordergrund. Diese Linsen gibt es nur vom Contactlinsen-anpasser.

**Anpassung:** Empfohlen wird die individuelle Anpassung über unser Bestellsystem adapta. Siehe Seite 18 | 19

## TL.S - individuelle, sphärische Weichlinsen

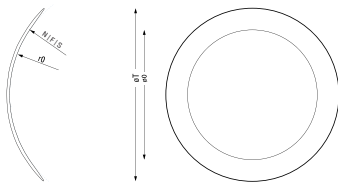

### TL.S

**Sphärisch mit tangentialer Abflachung.** Damit sich die individuellen Weichlinsen noch komfortabler dem Corneo-Skleral-Profil anpassen, sind TL.S Linsen mit unterschiedlicher Randabflachung erhältlich. Für oblonge Hornhautgeometrien (z.B. nach LASIK oder Keratoplastik) bieten wir die **TL.S Oblong** mit negativer Abflachung an)

	TL.S   TL.S 6M
Basiskurve	7,40 bis 9,60 mm in 0,10 mm Abstufung
Randabflachungen	N (Normal)   S (steil)   F (flach)   O (einkurvig)
Stärken	-30,00 bis +30,00 dpt in 0,25 dpt Abstufung
Durchmesser	12,50 bis 15,50 mm in 0,10 mm Abstufung
Anpassempfehlung Basiskurve	bei Ø 13,50 mm: Hornhautradienmittelwert +0,60 mm bei Ø 14,00 mm: Hornhautradienmittelwert +0,70 mm bei Ø 14,50 mm: Hornhautradienmittelwert +0,80 mm

## Materialien - individuelle Weichlinsen

Materialien Einstärkenlinsen	Jahreslinsen 12M	Halbjahreslinsen 6M
Material Details siehe Seite 10	BENZ-G 3X farblos / blau BENZ-G 4X farblos / blau BENZ-G 5X farblos / blau 67% farblos HD5 farblos / blau	BENZ-G 3X farblos / blau Contamac GMA 49% blau Contamac GMA 58% blau 67% farblos HD5 farblos / blau
Austauschintervall	Austausch nach spätestens 12 Monaten empfohlen	maximale Verwendungsdauer 6 Monate